




14.05.2025

QuantiFERON-TB Gold Plus - Vereinfachte Blutabnahme

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, liebes Praxisteam,

ab sofort vereinfachen wir für Sie die Handhabung der Blutentnahme des QFT-TB Tests zum indirekten Nachweis von Infektionen mit Mykobakterium tuberculosis.

Anstatt, wie bisher, 4 Spezialröhrchen abzunehmen,

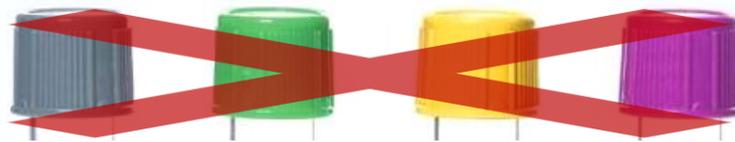

verwenden Sie nur **2 Heparinröhrchen á 4 ml**, je nach Anbieter mit **grüner** bzw. **orangefarbener** Kappe (Mindestvolumen 6 ml Heparinblut ist für die Untersuchung notwendig).



**BD
Vacutainer**



**Sarstedt
Monovette**

Zusätzlich, wie gehabt, wird eine EDTA-Monovette für die Blutbild-Bestimmung benötigt.

Die Probe soll taggleich (innerhalb von 16 Stunden) ins Labor transportiert werden.
Wir übernehmen die Beimpfung der QFT-TB- Röhrchen für Sie im Labor.

*Hinweis: Beachten Sie bitte weiterhin die Abnahmebedingungen und das Zeitregime, d.h. aufgrund der sich anschließenden Inkubationszeit im Labor bitte **keine Abnahme am Freitag bzw. direkt vor Feiertagen!***

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Ihr Medizinisches Labor Westsachsen